

ハンフリー補足

コシテンのこと

当学校の機種はパラメーターの表示の下にコシテンという項目が追加され、検査途中で眼が動いていないのに固視不良と出る場合に盲点の再検査ができ、固視監視をoffにすることもできる。

(この理由として、マ盲を耳側15°下側2°の位置を基準に反応があれば2°ごとにずらしていくのだが、決定する時にたまたま眼が動いていたりするとこのような状態になる。)

中心窩閾値の測定の件

- ・ 中心窩閾値の場合、fovea で見るため、検査に影響しないのでアイモニターは瞳孔中央に合わせなくとも良いと書いたが、やはりなるべく瞳孔中心を合わせるべきであるとのこと。

視野検査をダイヤモンド(4点視標)で行うときも同様。

- ・ 4つのダイヤモンドの中央を固視して見えたら押すように言うことも忘れないこと。

偽陽性と偽陰性について

当学校の機種は偽陽性と偽陰性が%で出ます。